

Ďakujeme, že ste si zakúpili práve náš test.

BIOGEMA

HEMOGLOBÍN FOB HEMOGLOBÍN FOB 3 v 1 TEST

TEST (REF 1037)

CE 0197

TEST (REF 1030)

CE 0197

RÝCHLY TEST NA ZISTENIE SKRYTÉHO KRVÁCANIA V STOLICI BEZ ŠPECIÁLNEJ DIÉTY

IVD

CHARAKTERISTIKA

Rýchly, jednoduchý a spoľahlivý test na stanovenie ľudského hemoglobínu pri skrytom (okultnom) krvácaní v stolici.

Rakovina hrubého čreva a konečníka je jedným z najčastejších druhov onkologických ochorení. Jej výskyt neustále stúpa a postihuje najčastejšie ľudí vo veku nad 45 rokov. U 10% populácie sa vyskytujú polypy - výrastky v sliznici čriev a v konečníku. Až 1% z nich sú zhubné a polypy väčšie než 0,5 cm stálym dráždením trvale krvácajú. Varovným signálom pre zistenie ochorenia je krv v stolici, ktorá je v počiatočnom štádiu okom nepostrehnuteľná. Stanovenie ľudského hemoglobínu pri tomto skrytom (okultnom) krvácaní v stolici využitím tohto testu je jednoduchým a spoľahlivým skriningovým vyšetrením kolorektálnych karcinómov - rakoviny čriev a konečníka.

UPOZORNENIE

- Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro. IVD
- Výsledok testu je potrebné porovnať s ostatnými klinickými príznakmi; odporúčame výsledok testu konzultovať s lekárom.
- Testovacia doštička a extrakčná skúmavka sú len na jedno použitie.
- Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie.
- Test nepoužívajte, ak je plastový obal poškodený alebo otvorený.
- Extrakčný roztok obsahuje konzervačné činidlo, ktoré pri priamom kontakte s pokožkou môže spôsobiť podráždenie. V prípade priameho kontaktu s pokožkou postihnuté miesto okamžite opláchnite vodou.

- Nepoužitý obsah zo skúmavky vylejte do výlevky.
- Po použití test zlikvidujte ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy.

ODPORÚČANIE

Ľudia s rizikom výskytu nádorového ochorenia, ktorým sa odporúča **každoročné skriningové testovanie:**

- muži a ženy od 40 rokov ako súčasť preventívnej prehliadky - aj po negatívnom výsledku
- ženy po operácii prsníka, maternice a vaječníkov
- preventívne príbuzní pacientov s onkologickým ochorením
- pacienti so všetkými formami roztrúsených črevných a adenómových polypov
- pacienti s nešpecifickými črevnými zápalmi - Crohnova choroba, ulcerózna kolitída

Kedy zvýšiť pozornosť:

- hnačka, zápcha, zmena pravidelnosti stolice
- krv, resp. tmavá farba stolice
- tráviace problémy - nadúvanie, krče, pocit plnosti, vetry
- únava, nechúť do jedla, strata hmotnosti

Neodoberajte vzorky pri menštruácii, silných hnačkách, krvácajúcich hemoroidoch.

Pred vyšetrením sa odporúča konzumovať:

- stravu bohatú na vlákninu - celozrnný chlieb a pečivo
- ovocie - jablká
- zelenina - brokolica, cesnak, surová kapusta.

Citlivosť

75 ng Hb.ml⁻¹ stolice

OBSAH BALENIA


- 1 ks (REF 1037) alebo
- 3 ks (REF 1030) vyhodnocovacie doštičky
- 1 ks (REF 1037) alebo
- 3 ks (REF 1030) skúmavka s extrakčným roztokom
- 1 ks návod na použitie
- 1 ks vysušovadlo (nepoužívať)




PRÍPRAVA VZORKY A POSTUP

Vzorky stolice odoberajte na toaletný papier alebo do vhodnej nádoby – nie sú súčasťou testu. Najlepšie je vykonať vyšetrenie hneď po odbere vzorky.

1. Otvorte farebný uzáver na skúmavke s extrakčným roztokom. Postupne odoberte vzorku ponorením zbernej tyčinky (špičky sondy, celý závit) do vzorky stolice na rôznych miestach, **maximálne toľko stolice, koľko pojme závit**.
2. Zbernú tyčinku opatrne vložte späť do skúmavky a pevne uzavrite. Dobre pretrepte, aby sa zmiešala vzorka a extrakčný roztok.

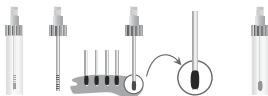

3. Testovaciu doštičku vyberte z hliníkovej fólie a položte na čistý a rovný povrch.
4. **Uvoľnite špičku na farebnom vrchnáku uzavretej skúmavky, skúmavku držte zvisle** a vytlačte 2-3 kvapky roztoku vzorky do okienka označeného šípkou, resp. písmenom S na testovacej doštičke.
5. Ak sa na testovacej doštičke neobjaví ružová čiarka v okienku C, doplňte ešte dve kvapky roztoku.

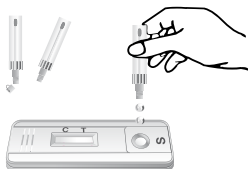

6. Po 10 – 15 minútach sa na doštičke vyfarbí jedna alebo dve čiarky. Po 20. minúte už výsledky neodčítavajte.

VYHODNOTENIE:

1. **Positívny výsledok v stolici sa nachádza krv:**



Na testovacej doštičke sa vyfarbia dve tmavočervené čiarky. Farebné čiarky v pozitívnej reakčnej zóne T a v kontrolnej zóne C sa môžu líšiť intenzitou sfarbenia, čo ale nemá vplyv na interpretáciu výsledku.

2. **Negatívny výsledok v stolici sa nenachádza krv:**



Na testovacej doštičke v kontrolnej zóne C sa vytvorí jedna farebná čiarka - v stolici sa nenachádza krv.

3. **Test nebol správne vykonaný**
Ak sa na testovacej doštičke neobjaví ani jedna čiarka, dokvapkajte do okienka označeného šípkou ešte pár kvapiek extraktu. V prípade, že sa stále neobjaví, test opakujte s novou testovacou doštičkou.

SKLADOVANIE

HEMOGLOBÍN / FOB test, resp. HEMOGLOBÍN / FOB test 3 v 1 skladujte pri teplote 4 - 30°C mimo dosahu detí. Test neuskladňujte v mrazničke. Test nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie.



Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro



Šarža



W.H.P.M Bioresearch & Technology Co., Ltd
No.2 Zhongxin Street, LouZiZhuang, Jinzhansiang
Chaoyang District, Beijing, 100018, P.R.China



Katalógové číslo



Dátum expirácie



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany



Obmedzenie teploty



Nepoužívať znovu



Výrobca



Pozorne rečítajte návod na použitie



Zastúpenie pre EÚ



Vhodné pre n testov

Dovozca pre SR a ČR:

BIOGEMA, v. d., Košice
Garbiarska 2, 040 01 Košice
Tel.: 055-6336753, 055-6225719, Fax: 055-6225719
e-mail: biogema1@stonline.sk www.biogema.sk