

Ďakujeme, že ste si zakúpili práve náš test.

BIOGEMA

MULTIDROGOVÝ 5 PARAMETROVÝ TEST (REF 1021) CE


TEST NA RÝCHLU DIAGNOSTIKU - DÔKAZ 5 DROG V MOČI: EXTÁZA,
PERVITÍN, BENZODIAZEPÍN, MORFÍN, MARIHUANA

CHARAKTERISTIKA

Výšetrenie má skríningový charakter, je rýchle a citlivé.

UPOZORNENIE

- Diagnostický prostriedok in vitro.
- Výšetrenie týmto testom poskytuje iba predbežný analytický výsledok.
- Výsledok testu je potrebné porovnať s ostatnými klinickými príznakmi, odporúčame výsledok testu konzultovať s lekárom špecialistom. Na potvrdenie najmä pozitívneho výsledku je potrebná špecifickejšia chemická metóda.
- Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod na použitie.
- Testovacia doštička je len na jedno použitie.

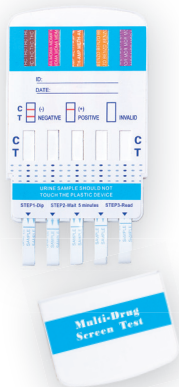

VZHĽAD A SPÔSOB APLIKÁCIE DROGY

Extáza - tablety, kapsuly, môžu sa podávať orálne (ústami) alebo injekčne.

Pervitín - orálne, injekčné, alebo sa šnupá.

Benzodiazepín - lieky - orálne, injekčné.

Morfín, kodeín, dolsín, heroín - prášok, tablety, ampuly, tekutina - orálne, injekčne, alebo sa fajčia a šnupá.

THC - obdoba tabakových listov, semenka (marihuana), kúsky tmavohnejšej živice (hašiš), tekutina. Podáva sa orálne alebo sa fajčí.

ÚČINKY

Extáza (MDMA) (3,4-metyléndioxyamfetamín). Po užití vedie k rýchlemu fyzickému a psychickému povzbudeniu. K fyzickým prejavom akútneho ovplyvnenia drogou patrí neklud, zvýšená frekvencia srdca, sucho v ústach, pocity búšenia srdca.

Pervitín (metamfetamín) je silné sympatikomimetikum. Pôsobí výrazne stimulačne na centrálnu nervovú sústavu, zvyšuje bdelosť, energiu a silu. Pri chronickom predávkovaní hrozí úzkosť, paranoja, zvýšený krvný tlak a srdcové arytmie.

Benzodiazepíny sa používajú v terapii ako anxiolytiká, antikonvulzíva, myorelaxanciá, sedatíva, hypnotiká. Navodzujú spánok, tlmia emotívne vzruchy.

Morfín, kodeín, dolsín, heroín (opiáty) sú silné analgetiká. Pôsobia narkoticky, vyvolávajú silnú psychickú závislosť, telesný útlm, uvoľnenie, zníženie či odstránenie bolesti. Pri možnom predávkovaní hrozí smrť, ťažké abstinenčné príznaky, agresivita, poruchy potencie a menštruácie, vážne poškodenie mozgu, pečene, infekcie - žltacka, HIV.

THC (marihuana) je halucinogénna látka. Spôsobuje stav uvoľnenosti, dobrej nálady, eufórie. Pri chronickom predávkovaní hrozí úzkosť, paranoja, depresie, halucinácie, zvýšený krvný tlak, strata pamäti a koordinácie.

OBSAH BALENIA

- 1 ks vyhodnocovacia doštička
- 1 ks návod na použitie
- 1 ks vysušovadlo (nepoužívať)

VZORKA

Najlepšie je vykonať vyšetrenie v deň odberu vzorky. Moč je možné skladovať 2 dni pri 2–8 °C, alebo zmraziť na dlhšiu dobu. Pred testovaním je nutné zahriať zmrazenú vzorku na izbovú teplotu a dobre premiešať.

VYKONANIE TESTU

Testovaciu doštičku vybalte z foliového obalu a následne otvorte ochranný uzáver testu.

1. Na 15 sekúnd ponorte prúžky do vzorky moču – maximálne po vyznačené šípky. Doštičku potom položte na podložku.
2. Výsledky odčítajte po 5 minútach.

VYHODNOTENIE:

Pozitívny výsledok

- prítomnosť drogy alebo jej metabolitu v moči:


Vytvorí sa len jedna ružová čiarka v kontrolnom okienku C.

Poznámka: Pozitívny výsledok znamená prítomnosť drogy alebo jej metabolitu v moči, ale nesignalizuje intoxikáciu alebo jej stupeň.

Negatívny výsledok

Na doštičke sa vyfarbia dve ružové čiarky. Farebné čiarky v okienku T a C sa môžu **líšiť intenzitou sfarbenia**, čo ale nemá vplyv na interpretáciu výsledku.

Výsledky je potrebné odčítať pre každú drogu samostatne!

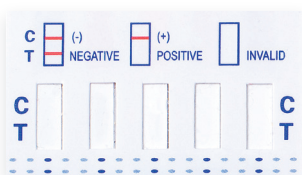

Test nebol správne vykonaný:

Ak sa na testovacej doštičke neobjaví ani jedna kontrolná čiarka, ponorte prúžky ešte na pár sekúnd do vzorky. V prípade, že sa stále neobjaví, test opakujte s novou doštičkou.

CITLIVOSŤ A ŠPECIFICITA

Test reaguje na prítomnosť:

- MDMA v ľudskom moči s koncentráciou vyššou než 500 ng/ml 4 dni po požití drogy
- metamfetamínu v ľudskom moči s koncentráciou vyššou než 1000 ng/ml 5 dní po požití drogy
- benzodiazepínu v ľudskom moči s koncentráciou vyššou než 300 ng/ml 7 dní po požití drogy
- morfinu v ľudskom moči s koncentráciou vyššou než 300 ng/ml 5 dní po požití drogy
- THC - 11-nor- Δ -9-tetrahydro-kanabinol-9-carboxylovej kyseliny v ľudskom moči s koncentráciou vyššou než 50 ng/ml 4 až 7 dní po požití drogy

SKLADOVANIE

Multidrogový test skladujte pri teplote 4–30 °C mimo dosahu detí. Test neuskladňujte v mrazničke. Nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie.

IVD

Diagnostický prostriedok in vitro

LOT

Sarža



W.H.P.M. Bioresearch & Technology Co., Ltd.,
No.2 Zhongxin Street, LouZiZhuang, JinChangiang,
Chaoyang District, Beijing, P.R.China 100018

REF

Katalógové číslo



Dátum expirácie

EC REP

Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



Obmedzenie teploty



Nepoužívať znovu



Výrobca



Pozorne rečítajte návod na použitie

Dovozca pre SR a ČR:

BIOGEMA, v. d., Košice

Garbiarska 2, 040 01 Košice
Tel.: 055/63 367 53, 055/62 257 19, 0904 22 81 31
e-mail: biogema1@biogema.sk www.biogema.sk

EC REP

Zastúpenie pre EÚ